

ENDOSKOPIK ALETLERİN KALBI

COOPDECH® Prendyme®

(Ön yıkama spreyi)

- Endoskoplar ve klemler ile boru şeklindeki medikal aletlerin iç yüzey temizliğinde kullanılan ideal bir spreydir.
- Temizlik ajanlarını basınçlı enjeksiyon yardımıyla püskürterek kontaminantları çıkarır.
- Güçlü bir temizleyicidir,enzim içeren temizlik ajanlarını kullanır.
- Nemlendirici ajanları kurumayı ve protein koagülasyonunu engeller.
- Özel dizayn edilmiş hortum başı bütün küçük girişlere uyum sağlar.
- Metal, plastik, kauçuk, tüp gibi maddelere zarar vermez.
- Üzerinde Bio-film oluşmasını ve kurummasını engeller.

COOPDECH

Patent pending

内視鏡や鉗子類の
細管腔予備洗浄スプレー

クーデック®
プレンドタイム

COOPDECH Prendyme

CE

All products are designed
and manufactured by
DAIKEN MEDICAL CO., LTD.

Made in Japan

www.hastip-medikal.com

Temizleyici ve nemlendirici ajanları basınç kullanarak enjekte eder. İç kısımdaki kontaminasyonları çıkararak, proteinleri temizleyen ve kurumayı engelleyen ideal bir ön yıkama spreyidir.



Ürünün Kullanılması



Direk olarak endoskopun iç kısmına uygulayın bu arada klemp kısmını kapıtmayı unutmayın.



Direk olarak endoskopun klemp kısmına uygulayın bu arada endoskop girişini kapıtmayı unutmayınız.



Endeskopla birlikte olan yıkama adaptörü de yıkanmalıdır.



İç kısma enjekte edilen bölüme de yıkanmalıdır.

Prendyme değişik tipte medikal aletlerle kullanılabilir, klemp, biyopsi iğneleri ve tüp gibi.

Ürün Kodu: CPD-330B

330mL hacimli, 10 adetlik ambalajda.

İçeriği; Yüksek düzeyde alkolik nonionik yüzey aktif ajanlar, proteolytic enzimler, düzenleştirci, nemlendirici, su, nitrojen pH: 8-9



Daiken Medical Co., Ltd has obtained ISO 9001 certification, an international standard on quality management systems related to medical devices.



Daiken Medical Co., Ltd has obtained ISO 9001 certification, an international standard on quality management systems.

Güvenlik Önlemleri

1. İnsan vücudunda kullanmayınız. Endoskop ve klempelerin iç kısımlarının yıkanmasında kullanılır.
2. Bu ürünü kullanırken maske, eldiven, gözlük gibi koruyucu ürünler kullanınız.
3. Kullanım sırasında dökmeyiniz, düşürmeyiniz.
4. Prendyme cihazların dış kısmına kullanılmaz.
5. Prendyme endoskopun iç kısmına uygulanırken endoskopun klemp girişi kapatılacak, klemp uygulanırken endoskopun girişi kapatılacak
6. Göz ile temasta bol suyla yıkanmalı gerektiğinde medikal yardım alınmalıdır.
7. Ağızdan alınırsa ağız çalkalanmalı su içilip gerektiğinde doktora müracaat edilmeli.
8. Deri ile temasta bulunursa derhal suyla yıkanmalı herhangi bir anormallik görülürse doktora müracaat edilmeli.
9. Prendyme direkt gün ışığından ve 40°C üstü sıcaklıktan uzak tutulmalı kullanımdan sonra parçalanmamalı, yakılmamalıdır.
10. 40°C altında saklanmalıdır. Eğer yüksek ısıda muhafaza edilirse temizleme kapasitesi düşer enzimler 5°C - 40°C arasında stabil kalabilirler.
11. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde muhafaza ediniz.
12. İçeriği bittiğinde önce içindeki gazı boşaltınız. Sonra da ateş almayacak bir yerde imha ediniz. Her zaman dik tutunuz.



HASTIP MEDİKAL ÜRÜNLERİ TİC. LTD. ŞTİ.
Meltem Mah. 3839 Sokak Güneş Sit. B-Blok 2/3 ANTALYA
T: +90.242. 237 91 34 • F: +90.242. 237 91 35
www.hastip-medikal.com



Pioneering the future of medical society
DAIKEN MEDICAL CO., LTD.

International Department: 2-6-2, Ayumino, Izumi-city,
Osaka, 594-1157, Japan
Coopdech's product information is available at the corporate website.
http://www.daiken-ko.jp/



HASTIP MEDİKAL ÜRÜNLERİ TİC. LTD. ŞTİ.

TIBBİ CİHAZ, TIBBİ SARF MALZEME VE LABORATUVAR CİHAZLARI İTHALATI, SATIŞI VE TEKNİK SERVİSİ

kaapsamında

ISO 9001:2000

Firma: